

Denseo NORM Malfarben Gebrauchsanleitung

Denseo TRUE COLOR sono colori universali per tutte le ceramiche, partendo da una temperatura di cottura di 725 °C . Così, essi possono essere usati su ceramiche refrattarie, pressate, fresate, su zirconio e titanio. Possono raggiungere la temperatura di 1.050 °C.I Denseo TRUE COLORS si usano per personalizzare corone o ponti o per caratterizzazioni individuali esterne ed interne (vedere la tabella di cottura seguente).

È possibile mescolare Denseo TRUE COLORS tra loro come desiderato, diluiti con il liquido o puri. Assicurarsi di usare sempre di un pennello pulito.

Usare i Denseo TRUE COLORS seguendo le temperature specificate dal

Produttore della ceramica.

Nota: Non acidificare lo zolfo!.....Nota: non usare acido solforico (es. Neacid)



Programma di cottura

temperatura iniziale:	500°C
Pre-essiccazione:	4 minuti
Velocità di riscaldamento:	65°C/minuto
Temperatura finale:	1050°C
Tempo di mantenimento:	1 minuto
Vuoto ON:	500°C
Vuoto OFF:	1050°C

Importante

Le temperature sono indicative. Le temperature devono essere adattate in quanto sono possibili alcune variazioni a seconda del forno utilizzato.