

Denseo CERAMIC Ofenreiniger 50 gr.

è una polvere per la pulizia della camera di combustione dei **forni per ceramica**.

Istruzioni d'uso:

Mettere 50 g di polvere per pulizia Denseo nel contenitore apposito e con attenzione inserirlo nella camera di combustione del forno per ceramica.

È particolarmente importante evitare la fuoriuscita della polvere, soprattutto sulla guarnizione della porta. Nel caso spegnere il forno immediatamente, lasciare raffreddare e spazzolare delicatamente tutta la superficie.

Utilizzare il programma di pulizia di cui è dotato ciascun forno, seguendo le indicazioni del produttore .

